


Měření kompresivních produktů DEONA MEDI

KOMPRESIVNÍ PUNČOCHY

- Měření se dělá ve stoje pacienta s lehce rozkročenýma nohama
- Metr se vždy na tělo přiloží – nikdy se extrémně nepřitahuje a ani nepovoluje
- Vždy se měří obě končetiny, aby bylo zřejmé, zda se neliší
- Míry se zaznamenávají do měřicího archu a teprve poté se z nich určuje velikost dle tabulky
- Malá písmena a1 – g jsou míry obvodové, velká písmena A-G jsou míry délkové
- Měření postupuje od míry a1 (záprstí) a směřuje směrem nahoru – to je důležité pro určení správné velikosti, protože velikost se zpřesňuje směrem nahoru končetiny
- Pokud míry neodpovídají žádné velikosti v tabulce – jedná se o zakázkovou výrobu
- Pokud se míry jen v jednom obvodu lehce liší od určité velikosti, lze se pro tuto velikost rozhodnout, neb punčochy tuto anomálii svým tlakem zvládnou pokrýt
- Vždy je dobré vědět i výšku pacienta (kvůli určení varianty krátké či dlouhé, všeobecně se dá říci, že do výšky 170 cm je varianta krátká a od výšky 170 varianta dlouhá, jinak lze změřit délku AD (na lýtkovou punčochu) či délku AG (na stehenní punčochu) a z tabulky velikost určit
- Velikost šlapky se neřeší, protože špice je udělaná tak, aby byla flexibilní pro různé velikosti chodidel (je řidší a velmi pružná a jen s menší ale kompresí)

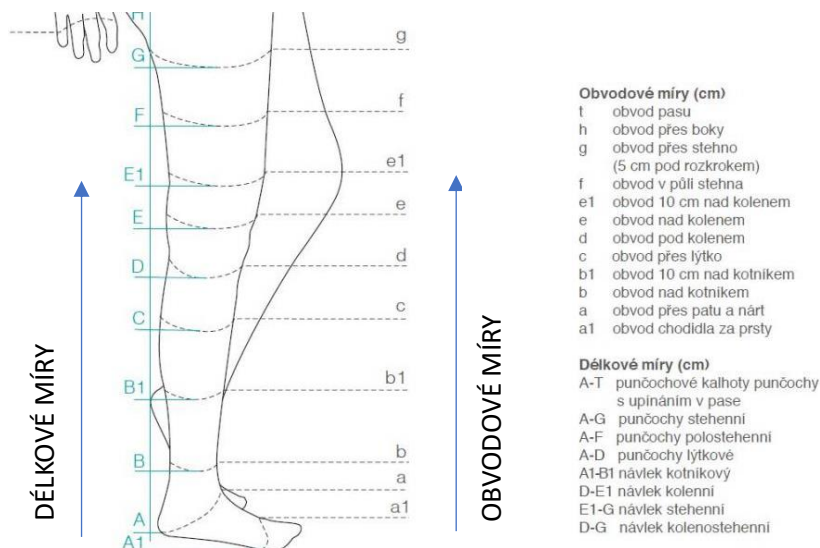

KOMPRESIVNÍ PUNČOCHY

Kompresivní punčochy (stehenní, polostehenní)							
Velikost	a1	b	c	d	e	f	g
1	22-24	22-24	37-40	34-37	36-39	46-51	50-56
1+						52-57	57-62
2	24-26	24-26	39-43	37-40	39-43	49-54	55-61
2+						55-60	62-68
2++	25-27	25-27	39-43	37-40	39-43	60-63	69-76
3						53-58	61-66
3+	27-30	27-30	42-46	40-44	43-47	59-65	67-74
3++						66-73	75-82
4	31-35	31-35				59-65	67-74

Pozn. Velikosti + jsou dostupné u řady DEONA COTTON a DEONA KLASIK,
Velikosti ++ jsou dostupné u řady DEONA KLASIK.

ROZMĚROVÉ TABULKY


Kompresivní punčochy (lýtkové)				
Velikost	a1	b	c	d
1	22-24	22-24	37-40	34-37
1+			40-42	38-40
2	24-26	24-26	39-43	37-40
2+			25-27	25-27
3	27-30	27-30	42-46	40-44
3+			46-49	45-47
4	31-35	31-35	46-49	45-47

Délkové míry		
Délka	Krátké (K)	Dlouhé (D)
A-G/T	66-70	71-75
A-D	34-37	38-40
A-F	53-56	57-60

KOMPRESIVNÍ LEGÍNY

- Platí vše výše zmíněné a navíc ještě následující:
- Pro určení správné velikosti legín postačuje rozměr: pas (t) a boky (h) (pokud nepatří dle tabulky do žádné velikosti tyto rozměry, pak se jedná o zakázkovou výrobu)
- Pro správnou konstrukci legín na zakázku jsou potřeba změřit všechny rozměry (pokud se například vynechá b1 a je tam nějaká zásadní anomálie, nebude produkt sedět)
- Je vhodné pro účely správného odhadnutí tvaru poskytnout k sestavení legín foto zepředu a z profilu (není to nutnost, ale usnadňuje to výrobu)
- Všechny legíny mají především ze zdravotních důvodů zvýšený sed a v kontextu toho je potřeba měřit obvod pasu ve správném místě – obvod se vždy měří v místě přes pupek, tak jak je naznačeno na nákresu (přes něj pak prochází horní okraj gumy legín)
- U legín je velmi důležitá výška, především při zakázce

Velikost šlapky se neřeší, protože špice je udělaná tak, aby byla flexibilní pro různé velikosti chodidel (je řidší a velmi pružná a jen s menší ale kompresí)

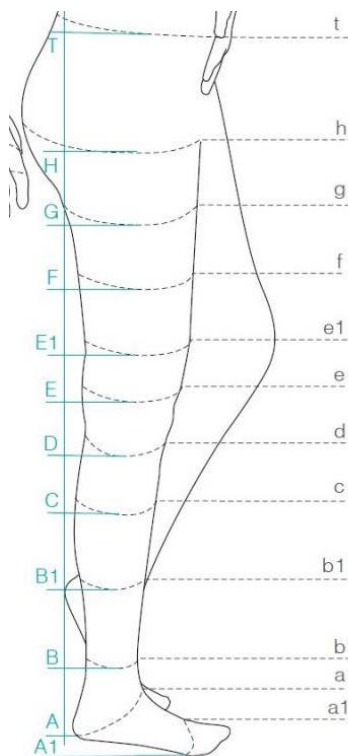

Obvodové míry (cm)	
t	obvod pasu
h	obvod přes boky
g	obvod přes stehno (5 cm pod rozkrokem)
f	obvod v půli stehna
e1	obvod 10 cm nad kolenem
e	obvod nad kolenem
d	obvod pod kolenem
c	obvod přes lýtko
b1	obvod 10 cm nad kotníkem
b	obvod nad kotníkem
a	obvod přes patu a nárt
a1	obvod chodidla za prsty

Délkové míry (cm)	
A-T	punčochové kalhoty punčochy s upínáním v pase
A-G	punčochy stehenní
A-F	punčochy polostehenní
A-D	punčochy lýtkové
A1-B1	návlek kotníkový
D-E1	návlek kolenní
E1-G	návlek stehenní
D-G	návlek kolenostehenní

Kompresivní bandáže (nohy) - DEONA VENUS, DEONA VENUS X, DEONA ACTIVE, DEONA X			
Velikost		Obvod t	Obvod h
S		63-69	88-95
S+		70-77	
M		78-85	96-101
M+			
L		86-95	102-108
L+			
XL		96-108	109-116
XL+			
XXL		109-121	117-126
XXL+			
XXXL			127-137